


## ОЦЕНИ. СПЛАНИРУЙ. ДЕЙСТВУЙ.

### ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА

Оцените глубину расположения SMAS, гиподермы и дермы в каждой области, нуждающейся в обработке, используя визуализацию в реальном времени Ulthera DeepSEE® аппарата Ulthera® System. Запишите полученные данные на картинках с целью оптимизации протокола процедуры Ultherapy®.

SMAS

Гиподерма/дерма

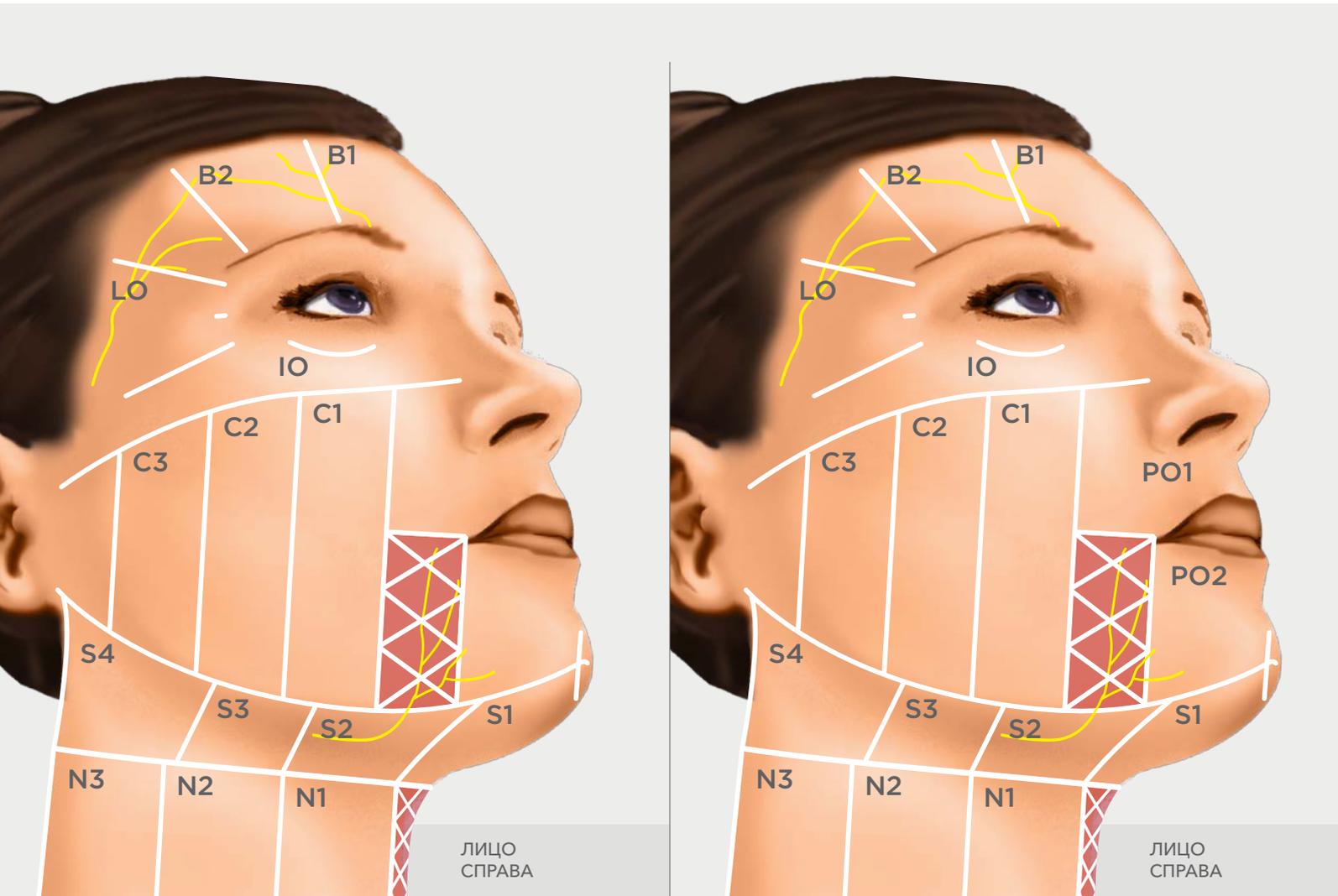

ГЛУБИНА 4.5 MM	ГЛУБИНА 4.5 MM	ГЛУБИНА 3.0 MM	ГЛУБИНА 1.5 MM
●●●	●●●	●●●	●●●
ДАТЧИК DS 7-4.5	ДАТЧИК DS 4-4.5	ДАТЧИК DS 7-3.0	ДАТЧИК DS 10-1.5

Расположение основных лицевых нервов: надглазничный, височная ветвь лицевого нерва и краевой нижнечелюстной нерв

❌ Не проводить терапию в этих областях


Примечания: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

# ОЦЕНИ. СПЛАНИРУЙ. ДЕЙСТВУЙ.


## ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА

SMAS

Гиподерма/Дерма

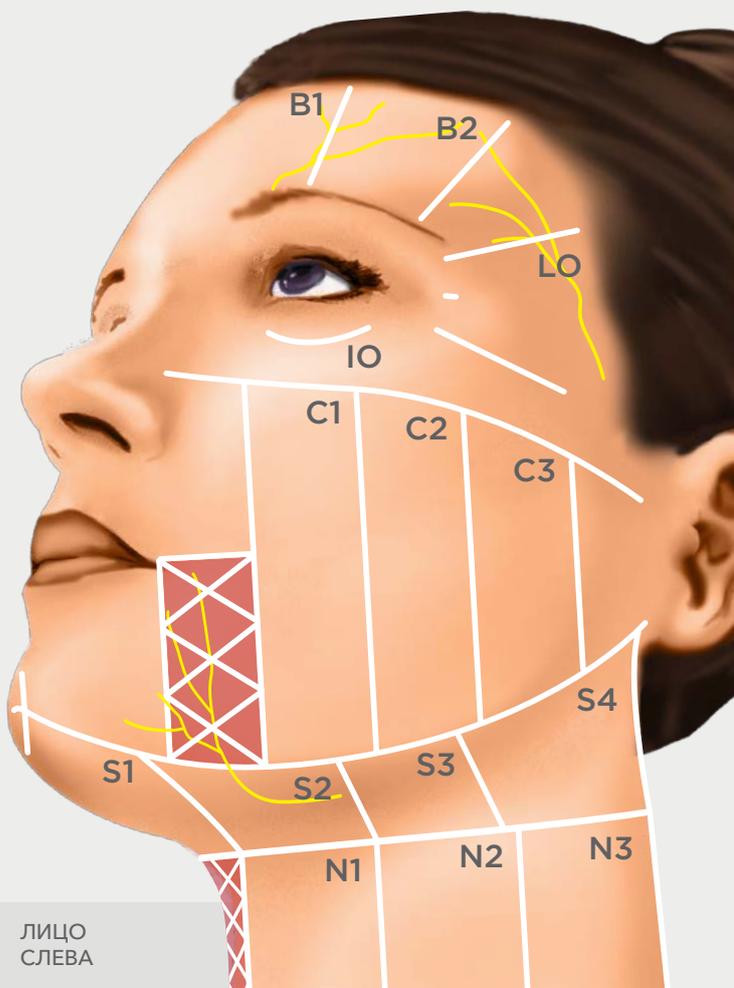

ЛИЦО  
СЛЕВА

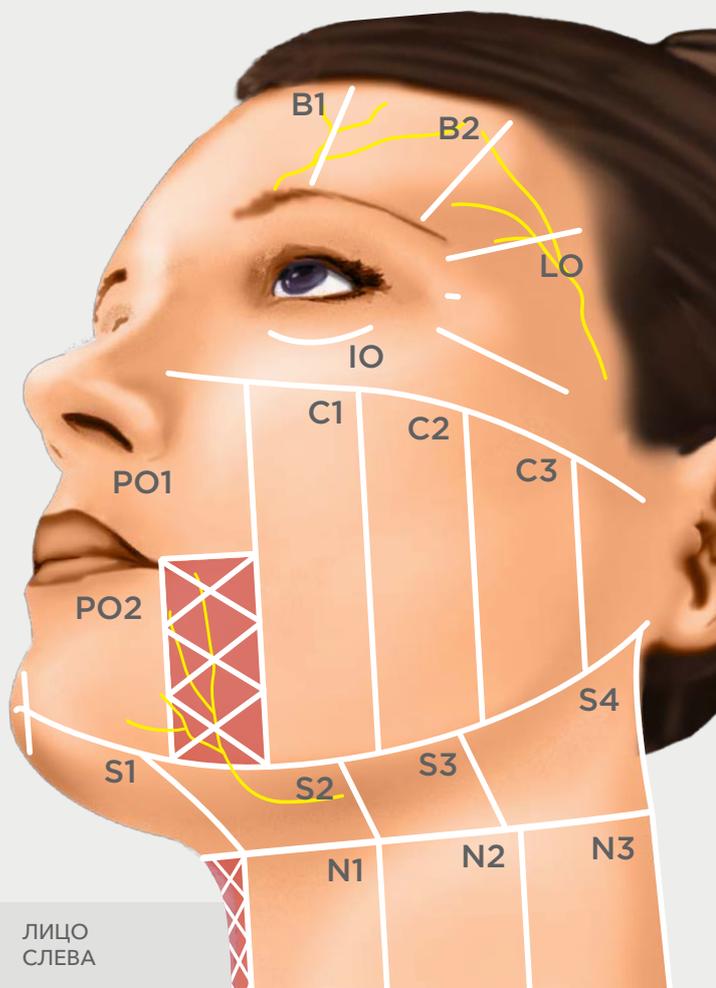

ЛИЦО  
СЛЕВА

ГЛУБИНА 4.5 MM ●●●	ГЛУБИНА 4.5 MM ●●●●	ГЛУБИНА 3.0 MM ●●●●	ГЛУБИНА 1.5 MM ●●●●
ДАТЧИК DS 7-4.5	ДАТЧИК DS 4-4.5	ДАТЧИК DS 7-3.0	ДАТЧИК DS 10-1.5

Расположение основных лицевых нервов: надглазничный, височная ветвь лицевого нерва и краевой нижнечелюстной нерв

⊠ Не проводить терапию в этих областях

Примечания: \_\_\_\_\_

Подпись врача: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

Обратитесь к инструкции по применению (ИПП) за получением более подробной информации по эксплуатации аппарата Ulthera® System.

Ultherapy® – единственная\* процедура с технологией микросфокусированного ультразвука и визуализацией в реальном времени, одобренная FDA<sup>1</sup> для лифтинга кожи лица, шеи и декольте, а также коррекции морщин<sup>2</sup>. Процедура разрешена к применению в России, странах Европы и США<sup>2-4</sup>.

1. FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. 2. Одобрение FDA, номер K180623 от 4 мая 2018 года. www.fda.gov. Accessed June 2015. 3. CE Сертификат 3808396CE01, DEKRA. Апрель 2012. 4. РУ РФ № ФСЗ 2010/06662. \* Данные действительны на момент 02.12.2019.

Информация предназначена для использования в специализированных медицинских учреждениях специалистами здравоохранения. **РУ № ФСЗ 2010/06662 от 12.03.2018**

ООО «Мерц Фарма»,  
123112, Москва, Пресненская наб., 10,  
тел.: +7 (495) 653 8 555.  
www.pro.ulthera.ru

 **Ultherapy®**  
ЗВУК. НЕСУЩИЙ КРАСОТУ